

ENDOZIME AW TRIPLE PLUS® (WITH A.P.A.)

Mehrstufiges enzymatisches Reinigungsmittel mit erweiterter Proteolytische Aktivität und Rostschutzmittel. Konzipiert für den Einsatz in allen Endoskop-, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Ultraschallbecken und der manuellen Reinigung.

ENDOZIME AW TRIPLE PLUS ist ein speziell entwickeltes enzymatisches Reinigungskonzentrat aus dem ENDOZYM-Reinigungskonzept. Es eignet sich besonders gut zur Reinigung von Instrumenten in Waschmaschinen, Ultraschallbecken und ebenso zur manuellen Aufbereitung. Außerdem erzielt man herausragende Ergebnisse bei der Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen, Gastroskopen, Koloskopen und Bronchoskopen. Durch den schonenden Reinigungsvorgang werden die empfindlichen Optiken und Teile wie Metall, Gummi und Plastik nicht angegriffen. Führende Hersteller von Endoskopen empfehlen **ENDOZIME AW TRIPLE Plus** zur Reinigung Ihrer Instrumente. Es ist hoch konzentriert und dadurch sehr kostensparend einzusetzen.

ENDOZIME AW TRIPLE Plus entfernt Blut, Schleim, Urin, Erbrochenes, Eiweiß und kristalline Ablagerungen von allen Instrumenten. Verstopfte Kanäle werden wieder gängig gemacht, störende Gerüche neutralisiert. **ENDOZIME AW TRIPLE Plus** ist zu 100 % biologisch abbaubar.

- **Konzentrat: Verdünnung von 4ml pro Liter**
- Entfernt alle Verunreinigungen. Reinigung startet bei Kontakt
- Bakteriostatikum
- Geringe Schaumbildung
- Erhältlich auch in kleineren Flaschen.
- Kompatibel mit allen medizinischen Materialien
- pH neutral, 100% biologisch abbaubar.
- Rosthemmend

Umwelt- und Kostenvorteile

Geringere Nutzung von Reinigungsmitteln
100% biologisch abbaubar
Weniger Plastik- und Verpackungsabfälle
Reduzierung des Energieverbrauchs

Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU41ENOAW 1 Euro-Kanister à 4,0 Liter
Art.-Nr.: 60RU44ENOAW 1 Karton mit 4 Euro-Kanister à 4,0 Liter



ANWENDUNG:

Manuelle Reinigung (Endoskope)

1. Keine Vordesinfektion, da erstens die Wirkstoffe die Enzyme abtöten und zweitens der Schmutzfilm durch das Desinfektionsmittel fixiert wird. Eine einwandfreie Reinigung ist so nicht mehr möglich.
2. Mischungsverhältnis 1:100 (je nach Verschmutzungsgrad/alle Temperaturen)
3. a: Instrument mit Enzymreiner **ENDOZIME** füllen
b: Enzymreiner **ENDOZIME** 1,5 Minuten einwirken lassen
c: Erneutes Spülen der Kanäle mit Enzymreiner **ENDOZIME**
d: Enzymreiner **ENDOZIME** 1,5 Minuten einwirken lassen
e: Nachspülen mit Wasser, danach desinfizieren.

Manuelle Reinigung (Instrumente)

1. Verschmutzte Instrumente so schnell wie möglich in ENDOZIME-Lösung geben.
2. **ENDOZIME** 3 Minuten einwirken lassen.
3. Instrumente mit Leitungswasser abspülen.

RUHOF
THE EXPERTS IN A BOTTLE

 **ascafamed**

ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: 06182-9292-10 Fax: 06182-9292-92
info@ascafamed.de www.ascafamed.de