

Super konzentriert! Super sparsam!

USE LESS
Clean More

Mehrstufiges enzymatisches Reinigungsmittel mit erweiterter Proteolytische Aktivität und Rostschutzmittel. Konzipiert für den Einsatz in allen Endoskop-, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Ultraschallbecken und der manuellen Reinigung.

ENDOZIME® Extreme Power kombiniert die Leistung eines Konzentrates mit der Leistung der bewährten Multi-Enzym-Ruhof-Formel um einen ultimativen Endoskop Reiniger zu erstellen. Diese einzigartige Kombination verleiht **ENDOZIME® Extreme Power** seine hervorragende Reinigungsfähigkeit, um eine schnelle und gründliche Entfernung von Verschmutzung zu gewährleisten. Angereichert mit APA (Advanced Proteolytic Action) erhöht sich die Protease-Enzym-Aktivität stark. **ENDOZIME® Extreme Power** dringt in die am schwersten zu erreichenden Kanäle und kanülierte Instrumente ein und löst sofort bei Kontakt grobe Verunreinigungen. **ENDOZIME® Extreme Power** enthält biologische Zusätze, die die Geschwindigkeit des Verflüssigungs- und Solubilisierungsprozesses und die Erleichterung der enzymatischen Wirkung beeinflussen.



- **Konzentrat: Verdünnung von 4ml pro Liter**
- wirksam in allen Wassertemperaturen (einschließlich kaltes Wasser)
- geringe Schaumentwicklung
- entfernt alle Verunreinigungen. Reinigung startet bei Kontakt
- erhältlich auch in kleineren Flaschen.
- kompatibel mit allen medizinischen Materialien
- pH neutral, 100% biologisch abbaubar.
- rosthemmend

Umwelt- und Kostenvorteile

Geringere Nutzung von Reinigungsmitteln
100% biologisch abbaubar
Weniger Plastik- und Verpackungsabfälle
Reduzierung des Energieverbrauchs

Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU21ENEXP 1 Euro-Kanister à 2,0 Liter
Art.-Nr.: 60RU26ENEXP 1 Karton mit 6 Euro-Kanister à 2,0 Liter



ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 6182 929210 Fax: +49 (0) 6182 929292
info@ascafamed.de www.ascafamed.de

ANWENDUNG:

Automatische Gerätereinigung:

Geben Sie 4ml XP pro Liter Wasser direkt in den Waschbehälter für die volle Leistung. Befolgen Sie die Herstellerempfehlung für die richtige Dosierung.

Manuelle Reinigung:

1. Fügen Sie pro Liter Wasser 4ml ENDOZIME® XP hinzu. (Funktioniert in allen Wassertemperaturen)
2. Tauchen Sie die Instrumente oder Endoskope ein. (Für Endoskope: Absaugen oder Spülen der Kanäle vor dem Einweichen)
3. 2 Min einweichen, um organische Substanzen zu entfernen. (Starke Verschmutzungen können mehr Zeit benötigen)
4. Gründlich mit Leitungswasser abspülen