


InstruSponge™

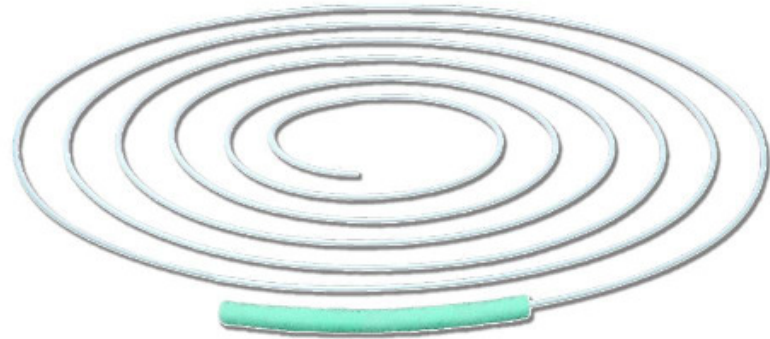

ENDOZIME® InstruSponge™ zur Reinigung von Endoskopen und kanülierten Instrumenten. Der Schwamm ist an einem flexiblen Kunststoffstab befestigt und kann somit leichtgängig durch komplexe interne Kanäle, Kanülen und Lumina manövriert werden. Dies ermöglicht ein lockern und beseitigen von groben Verunreinigungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kanal-Drahtbürsten, die Kratzer an den Arbeitskanälen verursachen können, ist die Schwammspitze sehr schonend. Sobald der Schwamm in Wasser getaucht wurde, sind die Enzyme aktiviert und die Reduzierung der Keimbelastung beginnt.

- Bereit für die Reinigung! Tauchen Sie den **InstruSponge™** in Wasser, um die enzymatische Schaumstoffspitze zu aktivieren.
- Einfach zu benutzen! Der flexible Kunststoffstab ermöglicht eine einfache Passage durch die Kanäle.
- Entwickelt für den einmaligen Gebrauch um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.
- Die Schwammspitze verhindert Schäden, die häufig durch harte Borsten verursacht werden.
- Im Gegensatz zu Borsten entstehen keine Spritzer bei dem Austreten aus dem Kanal.
- **InstruSponge™** ist mit mehrstufigem **ENDOZIME® AW Triple Plus®** imprägniert.

Der **InstruSponge™** ist für den einmaligen Gebrauch einzeln verpackt und in verschiedenen Größen erhältlich:

<u>Artikelnummer:</u>	<u>Länge:</u>	<u>Diameter:</u>
60RUSS3F	240mm	3mm
60RUSS4F	240mm	4mm
60RUSS5F	240mm	5mm

weitere Größen auf Anfrage erhältlich

