

Spray und Tropfer

Premixslip® ist ein nicht öliges, nicht klebendes, ungiftiges, silikonfreies Schmiermittel für chirurgische Instrumente. Es schützt vor Rost, Verfärbung, Flecken und Schwergängigkeit. **Premixslip®** reduziert kostspielige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen. Bei regelmäßiger Anwendung auf allen Instrumenten mit Gelenken verhindert es verkleben und dadurch auftretende Schwergängigkeit.

Der Dropper ist ideal geeignet für kleine Instrumente und Gelenke.



Wasserbasierend vs Ölbasierend

Die Zugabe von ölbasierenden Verbindungen zum Reinigungsprozess ist prinzipiell falsch. Es führt zu einer Verunreinigung der gesamten gereinigten Oberfläche. Wenn sollte ein wasserbasierendes Mittel verwendet werden. Mineralöle haben eine schlechte Biokompatibilität und können das Eindringen von Dampf oder sterilisierenden Gasen verhindern.

Eine Schmierung sollte nur nach eingehender Reinigung auf jene Bereiche angewendet werden, wo es erforderlich ist.

Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU250PRE 1 Flasche à 250ml
Art.-Nr. 60RU41PRE 1 Euro-Kanister á 4,0 Liter



ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 6182 929210 Fax: +49 (0) 6182 929292
info@ascafamed.de www.ascafamed.de

Anwendung:

Vor Gebrauch kräftig schütteln – nicht verdünnen

1. Beschränken Sie die Verwendung des Schmiermittels auf den erforderlichen Bereich des Instrumentes.
2. Lassen Sie **Premixslip®** für ca. 30 Sekunden einwirken.
3. Testen Sie anschließend das geschmierte Gelenk.
4. Bei besonders schwergängigen Instrumenten wenden Sie **Premixslip®** erneut an - öffnen und schließen Sie das Instrument bis es gelockert ist.
5. Wenn das Schmiermittel getrocknete Verunreinigung aus dem Gelenk verdrängt, ist eine erneute Reinigung erforderlich.
6. Bei einigen Instrumenten empfiehlt sich ein Tauchbad in **Premixslip®**.