

Prepzyme® ist ideal um verschmutzte Instrumente, Endoskope und Biopsiezangen feucht zu halten und das Antrocknen des Schmutzes zu verhindern.

Prepzyme® ist ein enzymatischer Schaum der verschmutzte Instrumente feucht hält und gleichzeitig damit beginnt Blut, Fett, Kohlenhydrate, Stärke und Eiweiß zu zersetzen. **Prepzyme®** enthält Rostmittel, welches das Instrument während des Transportes in die jeweilige Reinigungsabteilung schützt.

Es ist perfekt für den Einsatz in Operationssälen, Endoskopie, ambulanter Chirurgie, Dental und anderen Abteilungen in denen die Reinigung der Instrumente nicht sofort verfügbar ist. Keine Spritzer während des Transportes. Reduziert die Reinigungszeit.



Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU651PREP 1 Flasche á 650ml
Art.-Nr.: 60RU650PREP 1 Karton mit 24 Flaschen

- Sicher für alle Instrumente und Endoskope – flexibel und starr – verlängert die Lebensdauer
- pH neutral, 100% biologisch abbaubar
- Abspülbar
- Beschädigt keine Metalle, Kunststoffe, Gummi und Wellrohr
- Der aerosolfreie Schaum ist umweltfreundlich

ANWENDUNG:

1. Sprühen Sie direkt auf das verschmutzte Instrument, direkt nach dessen Gebrauch.
2. Lassen Sie die Instrumente im Schaum bis zur Reinigung. Wenden Sie **Prepzyme®** bei Bedarf öfter an um das Instrument feucht zu halten.
3. Spülen Sie die Instrumente vor der Reinigung mit Wasser ab.