

SURGISTAIN® entfernt mineralische Verfärbungen und Rost von chirurgischen Edelstahlinstrumenten schnell und sicher innerhalb von 15 Minuten.

SURGISTAIN® ist eine schnelle, sichere, effiziente und nicht korrosive Lösung, die mineralische Verfärbungen und Rost von Ihren chirurgischen Edelstahlinstrumenten, Schalen, Becken und Trolleys entfernt. Durch routinemäßigen Gebrauch wird **SURGISTAIN®** Reparatur- und Ersatzteilkosten senken und die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Instrumente erhöhen. In Verbindung mit unseren enzymatischen Reinigern wird die ursprüngliche Oberfläche des Instrumentes wiederhergestellt. **SURGISTAIN®** verhindert zerstörerischen Lochfraß auf den Kämme von mikrochirurgischen und ophthalmologischen Instrumenten.



VORSICHT
NICHT MIT CHROM- ODER
SILBERBESCHICHTETEN
INSTRUMENTEN BENUTZEN.

Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU41SST
Art.-Nr.: 60RU44SST

1 Euro-Kanister à 4,0 Liter
1 Karton mit 4 Euro-Kanister à 4,0 Liter

Anwendung:

Edelstahlinstrumente

1. Mischungsverhältnis
125ml **SURGISTAIN®** auf 1 L. Wasser
2. Verwenden Sie Handschuhe.
3. Verwenden Sie einen nicht porösen Behälter.
4. Legen Sie die sauberen (geöffnet) Instrumente für 15 Minuten in die Lösung. Vermeiden Sie Spritzwasser.
5. Grob oder stark verschmutzte Instrumente 30 Minuten einlegen.
6. Die Verwendung von nicht metallischen Bürsten kann den Prozess beschleunigen
7. Gründlich mit Wasser abspülen.

Edelstahl-Trolleys oder Schalen

Verwenden Sie F*A*C*T*S zur optimalen Reinigung

