

F.A.C.T.S.® entfernt jegliche Art von Korrosion wie Rost, Kalk, alkalische und basisch-mineralische Ablagerungen an den Innenwänden des Autoklaven, sowie von Trolleys und Tablett.

- Das schäumende Spray haftet länger an den Wänden, so dass ein besseres Durchdringen und ein effektiveres Reinigen möglich sind.
- Es beseitigt gleichzeitig unangenehme Gerüche.
- **F.A.C.T.S.®** ist abspülbar und hinterlässt keine Rückstände.
- Die aerosolfreie Reinigungsflüssigkeit ist umweltfreundlich.
- Wiederholen Sie die den Vorgang so oft wie gewünscht.
- Die regelmäßige Anwendung von **F.A.C.T.S.®** wird die Lebensdauer Ihrer Edelstahlausrüstung verlängern.

Anwendung:

Für Autoklaven, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

1. Autoklavenwände müssen kalt sein.
2. Sprühen Sie **F.A.C.T.S.®** großzügig auf die Innenseite der Kammer.
3. Lassen Sie es 15-30 Minuten einwirken.
4. Durch verwenden einer nicht metallischen Bürste kann der Prozess beschleunigt werden.
5. Die Verwendung von Handschuhen wird empfohlen.
6. Spülen Sie die Wände mit ausreichend Wasser ab.

Für alle Edelstahl-Trolleys/Fahrwagen und Oberflächen

1. Sprühen Sie **F.A.C.T.S.®** großzügig auf die Oberfläche.
2. Lassen Sie es 15-30 Minuten einwirken.
3. Durch verwenden einer nicht metallischen Bürste kann der Prozess beschleunigt werden.
4. Verwendung von Handschuhen wird empfohlen.
5. Spülen Sie die Oberfläche mit ausreichend Wasser ab.



Verfügbar in:

- Art.-Nr.: 60RU651FACTS 1 Flasche mit á 650ml
Art.-Nr.: 60RU650FACTS 1 Karton mit 24 Flaschen á 650ml