

**Enzymatischer Schaum
Mit Applikator Spitze
Extreme Schaumbildung
Verhindert ein Anhaften von Verschmutzungen
Geeignet für die Oberflächen aller chirurgischen
Instrumente und Endoskope**

Prepzyme® X.F. bietet einen dichten, langanhaltenden Schaum der verschmutzte Instrumente feucht hält und gleichzeitig beginnt Blut, Fett, Kohlenhydrate, Stärke und Eiweiß zu zersetzen. Es erleichtert die Reinigung und hilft dabei Zeit zu sparen in den Verschmutzungen daran hindert an der Instrumentenoberfläche anzutrocknen. Es ist eine hervorragende Alternative zu Lösungen auf Wasserbasis die bei längerem Einweichen dazu führen Rost zu bilden. Perfekt für den Einsatz in sterilen Bereichen wie Operationssäle, Endoskopie, Ambulante Chirurgie, Dental und anderen Abteilungen in denen die Reinigung der Instrumente nicht sofort verfügbar ist. Keine Spritzer während des Transportes. Das Instrument ist sofort bereit für die Dekontamination. **Prepzyme® X.F.** ist klinisch erprobt und hinterlässt keine Rückstände am Instrument.



- Länger anhaltender Schaum sorgt für ein besseres Durchdringen an Verschmutzungen
- Mit dem dichten Schaum kann das Instrument vollständig abgedeckt werden
- Hält verschmutzte Instrumente bis zu 72 Stunden feucht
- Beseitigt auch angetrockneten Bio-Film
- Einfache und sichere Handhabung.
- pH Neutral
- Hinterlässt keine Rückstände
- Kompatibel mit allen medizinischen Materialien

Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU410PREPXF 1 Flasche à 410ml
Art.-Nr.: 60RU410PREPXF-24 1 Karton mit 24 Flaschen

Anwendung:

1. Sprühen Sie direkt auf das verschmutzte Instrument sofort nach dem Gebrauch.
2. Lassen Sie die Instrumente im Schaum bis zur Reinigung. Wenden Sie **Prepzyme® X.F.** bei Bedarf öfter an um das Instrument feucht zu halten.
3. Spülen Sie das Instrument vor der Reinigung mit Wasser ab.



ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 6182 929210 Fax: +49 (0) 6182 929292
info@ascafamed.de www.ascafamed.de